



D-PRODUCTS
info@d-products.be
www.d-products.be
0472/188493



QUICK & CLEAN S-WIPES CITROEN FRIS

Gebruiksklare desinfectiedoeken

HANDIGE EN TIJDBESPARENDE APPLICATIE

EFFECTIEVE DESINFECTIE MET FRISSE GEUR

GROTE, SCHEURVASTE, PLUISVRIJE DOEKEN

ECOLOGISCHE OPLOSSING MET HERBRUIKBARE EMMER



Quick & Clean S-wipes zijn gebruiksklare doeken, gedrenkt in een alcoholhoudende oplossing, zonder aldehyde, voor zachte desinfectie en reiniging van alle soorten gladde oppervlakken. Ze zijn goedgekeurd als Medisch Hulpmiddel en kunnen daarom zelfs worden gebruikt voor toepassingen in de gezondheidszorg, voor het desinfecteren van medische hulpmiddelen, medische voorraden en zones in de buurt van patiënten.

Handige en tijdbesparende applicatie

Quick & Clean S-wipes zijn opgerolde geïmpregneerde doeken, direct klaar voor gebruik. De doeken worden in een herbruikbare emmer met hersluitbare deksel gestopt en worden tijdens gebruik van binnen naar buiten afgerold. De doeken zijn scheurvast en kunnen dus gemakkelijk individueel uit de emmer worden gehaald. Na desinfectie droogt het oppervlak snel. Een tijdbesparende manier om uw oppervlakken te desinfecteren!

Effectieve desinfectie met frisse geur

Quick & Clean S-wipes zijn doeken voor eenmalig gebruik, gebaseerd op een optimale combinatie van doekmateriaal en desinfectiemiddel. De inweekvloeistof is een mengsel van alcoholische en niet-alcoholische desinfectiemiddelen. De hoogwaardige doeken geven de actieve ingrediënten optimaal af. Hierdoor blijven de behandelde oppervlakken goed vochtig, waardoor een betere contacttijd met het desinfectiemiddel mogelijk is. Het resultaat: snelle en effectieve desinfectie met een frisse citroengeur, waarbij gevoelige oppervlakken en materialen voorzichtig worden behandeld en er geen pluisjes, strepen of resten achterblijven.

Tabel: biocidale werking en normen

BACTERICIDE

S. aureus, *E. hirae*, *P. aeruginosa*, *E. coli*: EN 13727, EN 13697, EN 16615

MYCOBACTERICIDE

M. terrae, *M. avium*: EN 14348

LEVUROCIDEN

C. albicans: EN 13624, EN 16615, EN 13697

FUNGICIDE

A. brasiliensis: EN 13697

VIRUCIDE

Omhulde virussen

MVA Gemodificeerd Vacciniavirus Ankara : EN 14476

Niet-omhulde virussen

Adenovirus Type 5, *menselijk rotavirus*, *poliovirus type 1*, *Murine norovirus*: EN 14476


Adenovirus type 5, *Murine norovirus*: prEN 16777

Raadpleeg de technische fiche voor meer informatie over de desinfecterende werking en blootstellingstijden.

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Grote, goed doordrenkte doeken

De Quick & Clean S-wipe is groter dan een klassieke wipe (300x300mm) en bevat meer desinfecterend product. Omdat het ongeveer 10x meer weegt dan een klassiek doekje, droogt het minder snel uit en **kan een veel groter oppervlak met één doek worden gedesinfecteerd.**

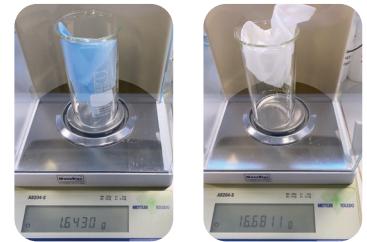


Classic wipes 1,6g

Q&C S-wipes 16,7g

De onderstaande test vergelijkt de (versnelde) droogtijd van een klassiek blauw desinfectiedoekje met die van de Quick & Clean S-Wipe. Beide producten zijn onderworpen aan 30"- durende intervallen van blootstelling aan koude lucht. Na elke 30 seconden werden de doeken gewogen. Er kan worden waargenomen dat het klassieke doekje al na de eerste 30s bijna volledig droog is (-98% van het relatieve gewichtsverlies). Bij de Quick and Clean S-wipes duurt dit ongeveer 2,5 minuut.

Opmerking: door koude lucht te blazen, wordt de verdampingssnelheid versneld.

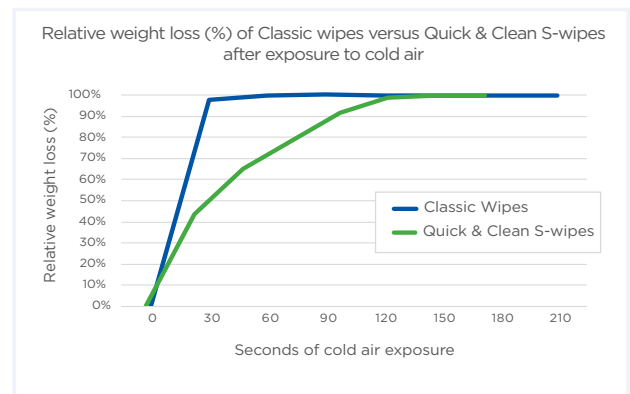

Ecologische oplossing

De Quick & Clean S-wipe-rollen zijn verpakt in een zak en worden geleverd met een optionele hervulbare emmer, wat aanzienlijke besparingen op plastic verpakkingsafval mogelijk maakt.



90 doeken per rol,
2 rollen per doos



Hervulbare
emmer